

Drænageinstruktion

PleurX katetersystem


VINGMED

Januar 2021

Denne instruktion skal kun bruges som en vejledning. Læs brugervejledningen som er vedlagt drænagekittet, og se drænagevideo for mere detaljeret instruktion.

FÅ BEGYNDT Klargør indholdet i drænkittet og vask dine hænder grundigt.

1 Fold den blå indpakning ud på et rent bord. Placer flasken tæt ved det blå stykke indpakning, og placer flaskens adgangsspids på den blå indpakning.

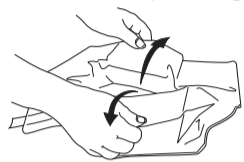


2 Tag hver handske ved håndleddet og tag dem begge på.



3 De 3 spritserviet pakninger rives op. Læg de nu åbne pakninger på den blå indpakning lidt væk fra de sterile dele.




4 Rulleklemmen på drænageslangen lukkes helt, og plasticbeskyttelsen fra adgangsspidsen fjernes.

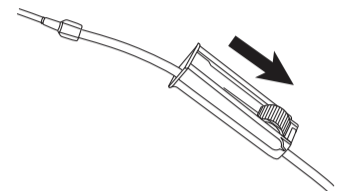


TILSLUT DRÆNAGE FLASKEN Kateter og adgangsspids skal holdes rene.


5 Tag ventilhætten af katetret.

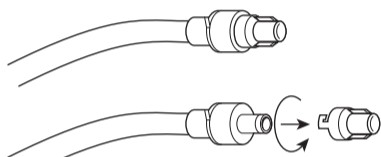


6 Rengør omkring ventilåbningen med den 1. spritserviet.

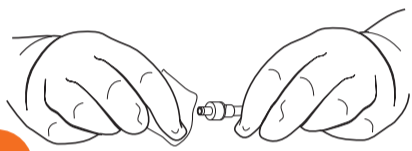

7 Indsæt adgangsspidsen i kateterventilen.

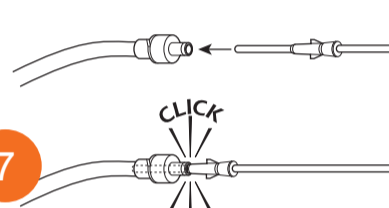


8 Fjern plasticstykket fra toppen af drænageflasken.

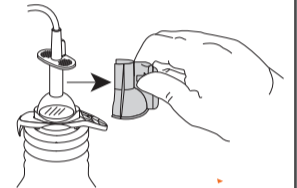


VÆSKE DRÆNAGE Dræn ikke mere end 1000 ml fra brysthulen eller 2000 ml fra bughulen af gangen.


9 Tryk "T" stemplet ned.

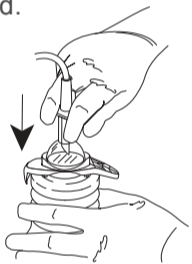


10 Rulleklemmen på drænageslangen åbnes for at påbegynde drænage.

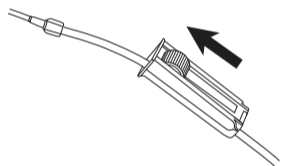

11 Rulleklemmen på drænageslangen lukkes, når dræningen er slut.

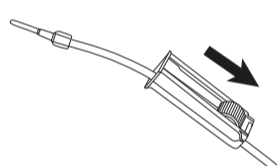


12 Træk adgangsspidsen ud af kateterventilen og læg adgangsspidsen fra dig.

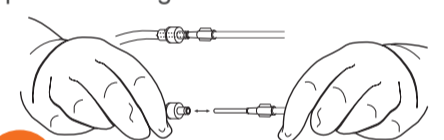


DE SIDSTE TRIN EFTER DRÆNAGEN ER AFSLUTTET


13 Rengør omkring ventilåbningen med den 2. spritserviet.

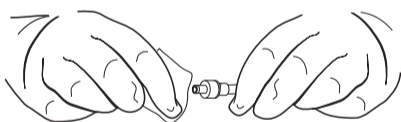

14 Sæt ny ventilhætte på kateterventilen og drej indtil den "klikker" og er i låst position.

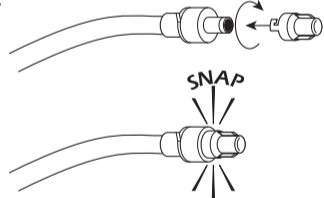


15 Rengør huden omkring katetret med den 3. spritserviet.

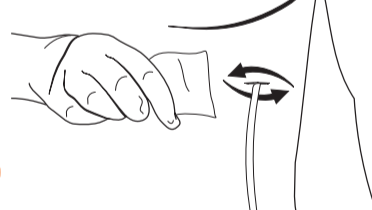


16 Placer skumpatchen omkring katetret og rul katetret pænt sammen oven på patchen. Dæk katetret med gaze patchen.




17 Fjern midterstykket fra bagsiden af den selvklæbende forbindelse.

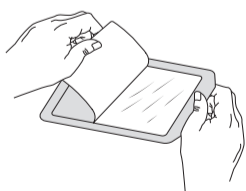

18 Fjern beskyttelsesstykket fra klæbeflader.

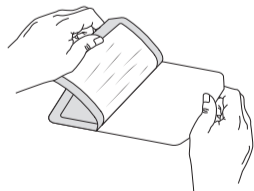

19 Placer forbindelsen over gaze patchen og applicer fra midten og udefter.

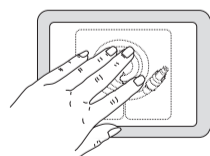


20 Fjern rammen omkring den selvklæbende forbindelse.




Hvis du har spørgsmål eller bekymringer så kontakt din læge eller sygeplejerske


21 Med et fast tryk opad med tommelfingeren fjernes flaskeåbneren og det fleksible låg fra flasken.

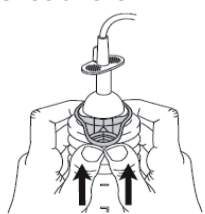

22 Fjern flaskeåbneren fra drænslangen ved at klemme det fleksible låg sammen og træk det gennem flaskeåbneren.

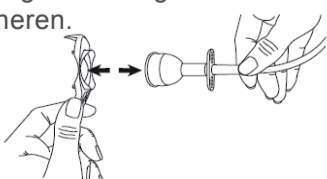

23 Pres den spidse ende af flaskeåbneren ind i hullet på folieforseglingen. Drej flasken for at gøre åbningen i folieforseglingen større.

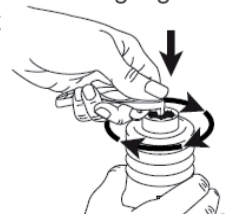

24 Hæld flaskens indhold i toiletet. Læg alle komponenter i en affaldspose, der lukkes tæt, og kasser den.

