

Skylleinstruktion

PleurX Katetersystem

PleurX kateter Adgangskit (50-7280).
Denne instruktion bruges til
skylning af PleurX kateter.
+ Procedurepakke (50-7290)


Adgangskit kan også anvendes til
udtrækning af steril væskeprøve.

April 2021

VINGMED


FÅ BEGYNDT Vask dine hænder grundigt og klargør indholdet i Adgangskit

Åben kateter Adgangskit og
fold den blå indpakning ud på
et rent bord.
Tag sterile handsker på.

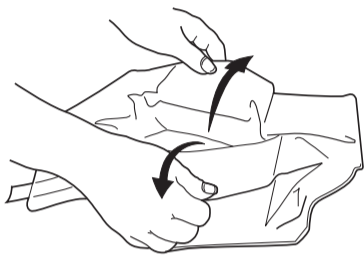


1

Tag ventilhætten af katetret og
kasser den.

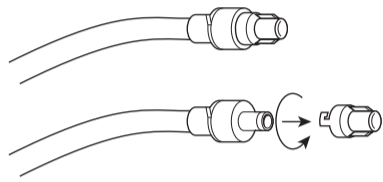


2

Rengør omkring ventilåbning-
gen med en ny spritserviet.

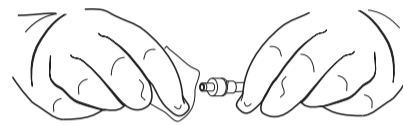

3


Plasticbeskyttelsen fra
adgangsspidsen fjernes.
Undgå forurening af
adgangsspidsen.

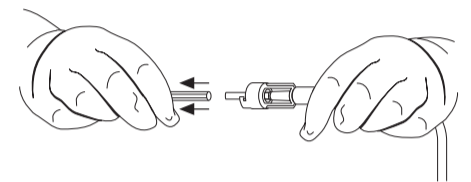

4


TILSLUT ADGANGSKIT Kateter og adgangsspids skal holdes rene

Indsæt adgangsspidsen i
kateterventilen.

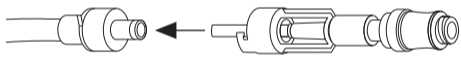


5

Der kan høres og føles et klik,
når adgangsspids og ventil er
korrekt sammenkoblet.

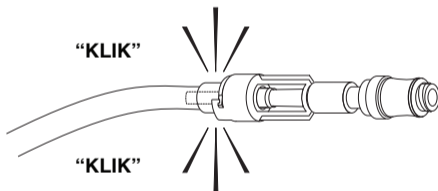

6

Lås adgangsspidsen til
kateterventilen ved at dreje
adgangsspidsen indtil den
"klikker" igen og er i låst
position.

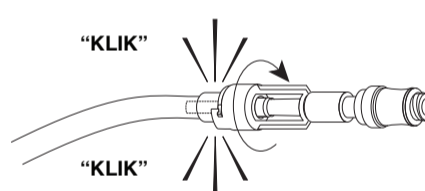


7

Skylning: Sprøjten fyldes med
sterilt saltvand.

Steril væskeprøve:
Ufyldt sprøjte.

Sprøjten indsættes i den
kanylefri adgangsventil.

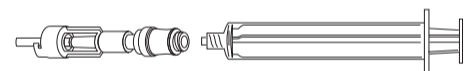

8


SKYLNING AF DRÆN (STERIL VÆSKEPRØVE) De sidste trin af proceduren

Skyl katetret med sterilt salt-
vand i henhold til sygehusets
protokol. Brug ikke mindre end
10 ml til skylning af katetret.
Hvis katetret ikke kan skylles
eller aspireres, kan det delvist
eller helt være tilstoppet. Skyl
ikke mod modstand.

*Steril væskeprøve: Træk
sprøjtestemplet tilbage for at
trække en steril væskeprøve.*


9

Når proceduren er slut, fjernes
adgangsspidsen fra katetret.
Drej adgangsspidsen for at
låse den op fra kateterventilen.
Rengør omkring ventil-
åbningen med en ny
spritserviet.

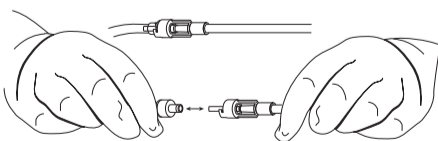


10

Sæt ny ventilhætte på kateter-
ventilen og drej indtil den
"klikker" og er i låst position.

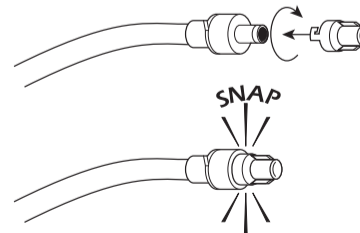

11

Læg igen den vanlige forbindelse.
(Procedurepakke 50-7290).

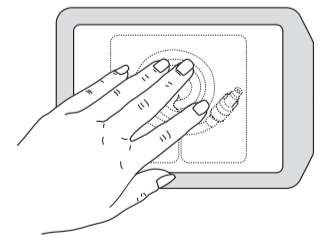

12