



## Dele og tilbehør


Mundvandsbeholder

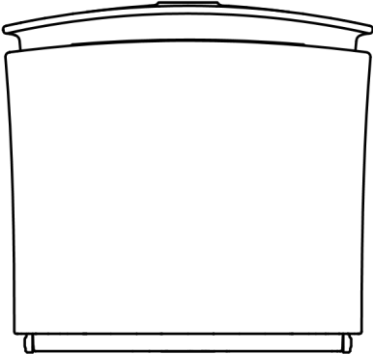


Mundstykke

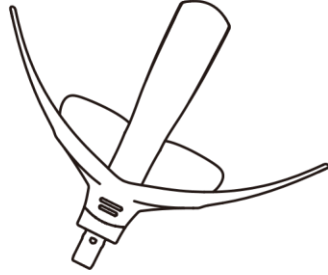


Konsol

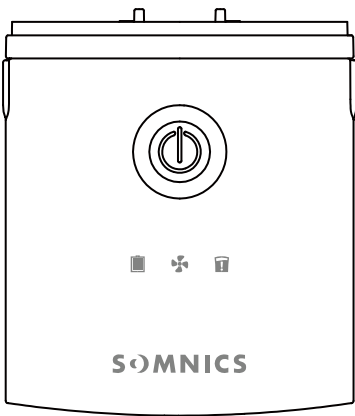


Slangesæt

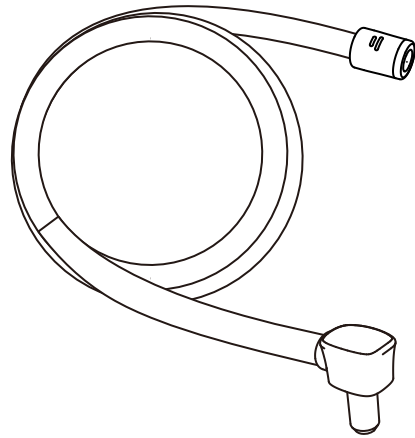


DryPad

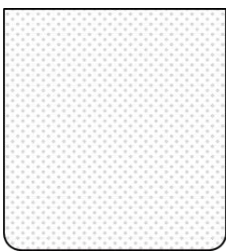


Boks til opbevaring af mundstykke  
(Skal købes separat)

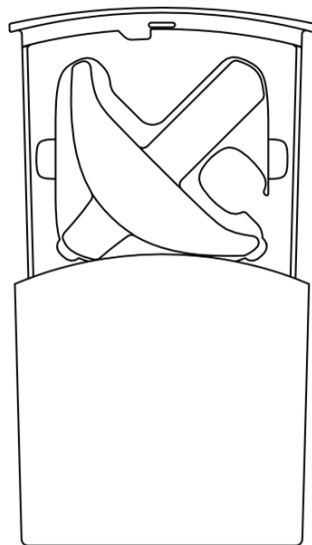

Strømadapter

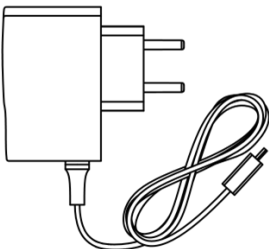


Tryk for frigørelse af mundvandsbeholder

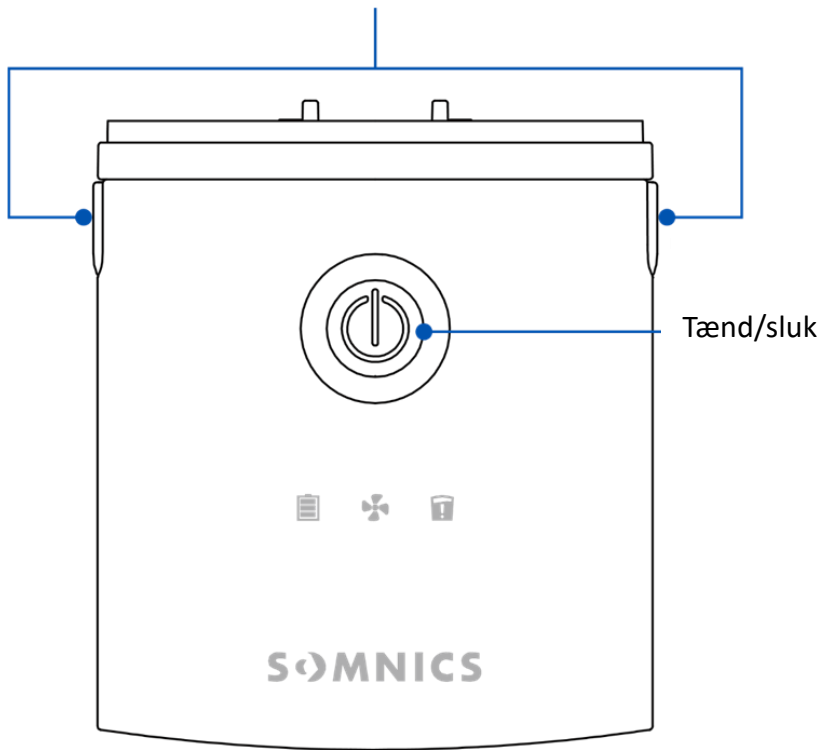

USB-portdæksel

USB-Port

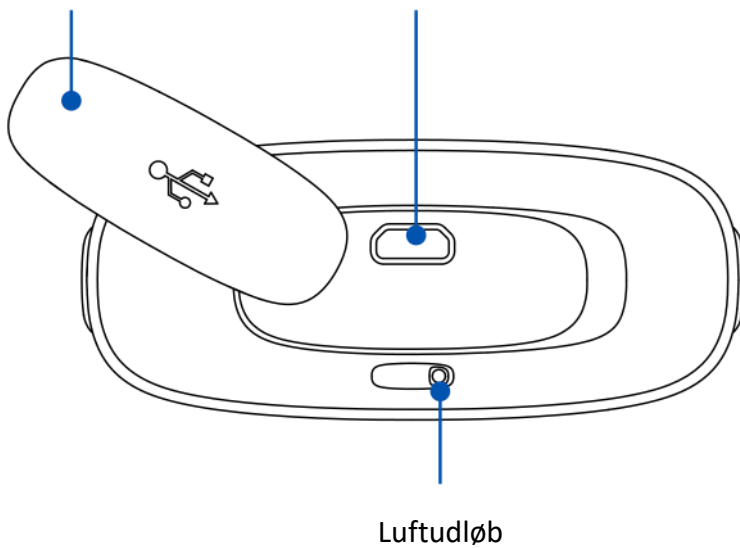

## LED-indikatorer



Batteri



Batteri lav



Batteri fuld



Opladning



Opladning afsluttet



Pumpe



Pumper til vacuum er opnået



Fuld vacuum



Mundvands-  
beholder



Forkert påsat



Korrekt påsat




Mundvandsbeholder er fuld

## Opladning

Åbn USB-portdækslet og sæt strømadapteren i en almindelig stikkontakt. (100-240Vac).

Skal oplades ca. 8 timer første gang.


Derefter kun til LED-indikator viser fuld batteri.

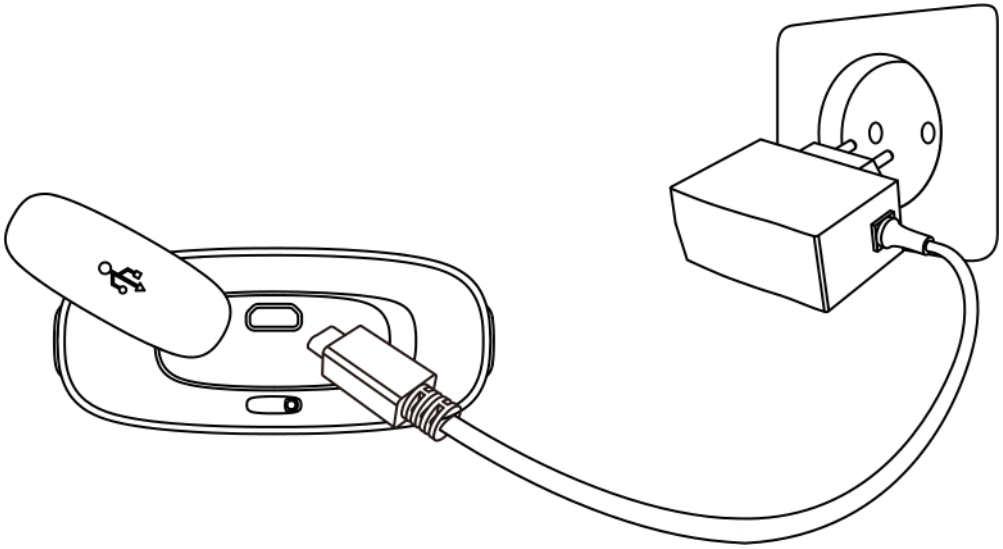


## DryPad

Riv toppen af DryPad ved perforeringen.


Tryk let på siderne af DryPad, så der bliver en åbning. Midtrøret, på mundvandsbeholderens låg, placeres i den åbne DryPad.

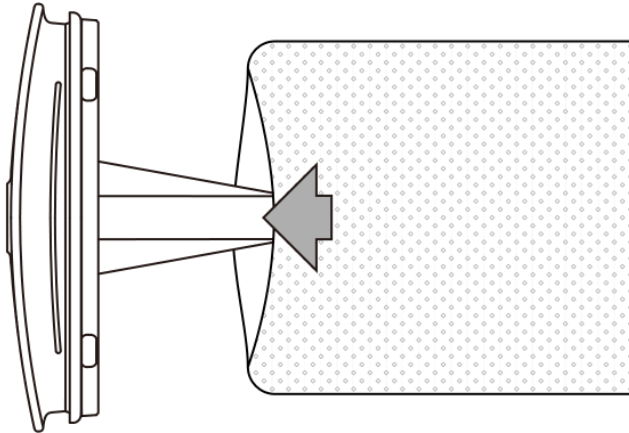


Placer DryPads perforeringslinje under mundvandsbeholderens låg.

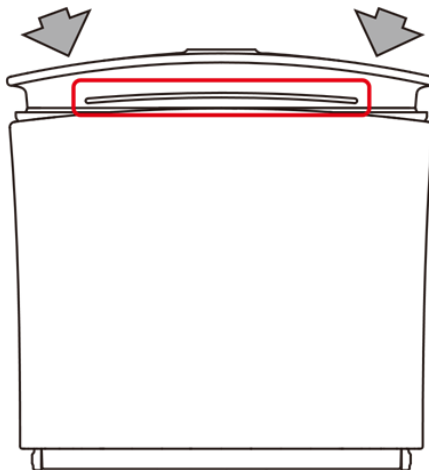

Sæt låget på mundvandsbeholderen og sørg for at der ikke er mellemrum mellem beholderlåget og mundvandsbeholderen.


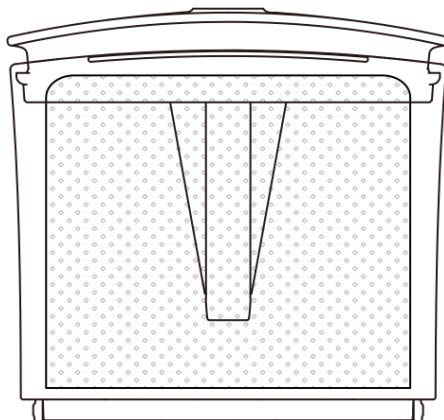


Sørg for at læbeskjoldet er placeret mellem forsiden af tænderne og bagsiden af læberne.

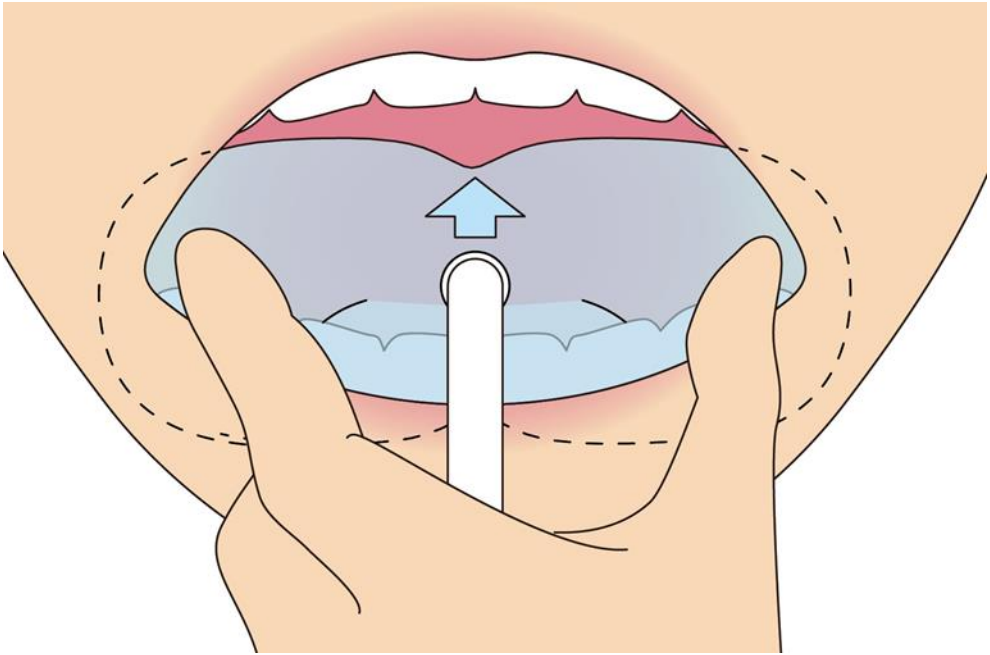


## Mundstykket

Indsæt mundstykket i din mund ved at klemme læbeskjoldet korrekt.

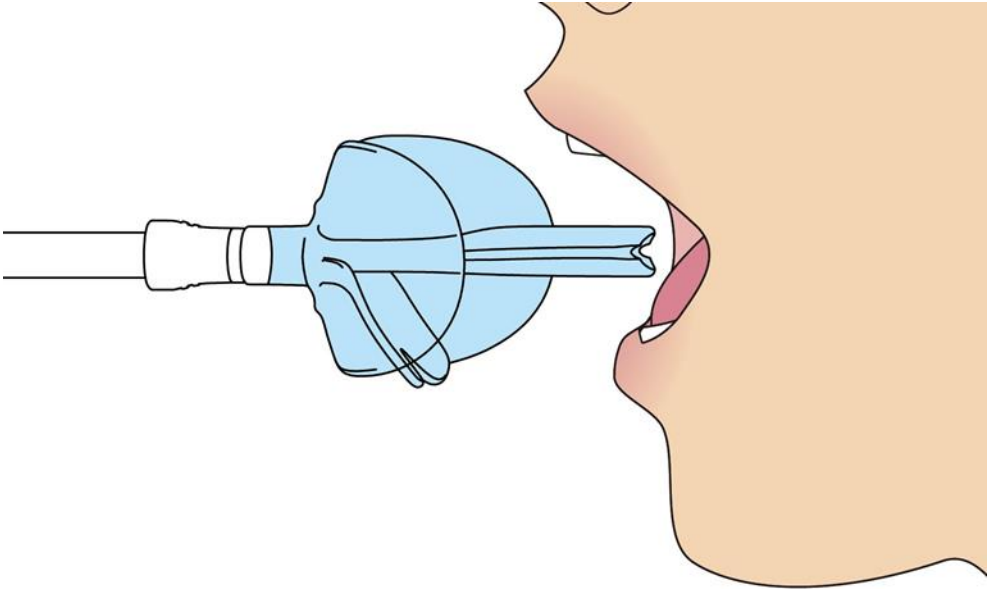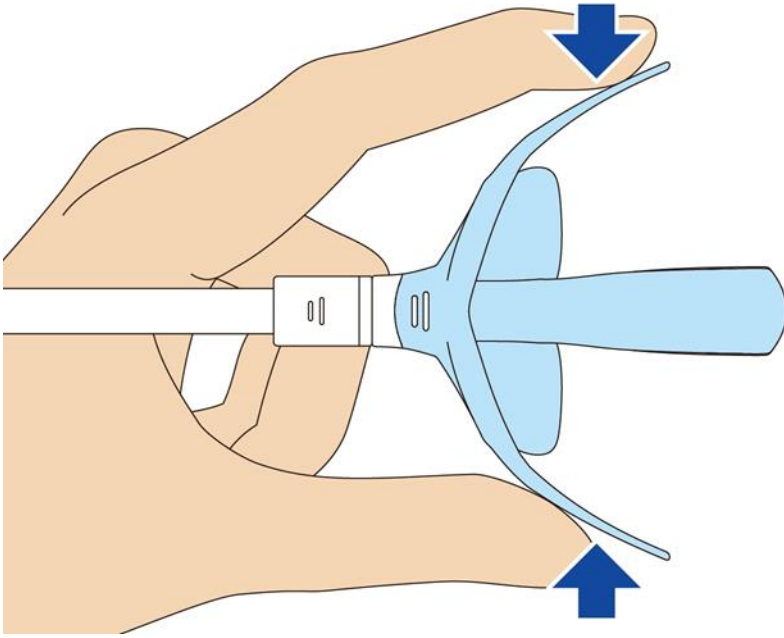


Luk munden og gør dig klar til at begynde behandlingen med iNAP.  
Placer tungen ovenpå tungeskjoldet og under trykleveringsstykket.

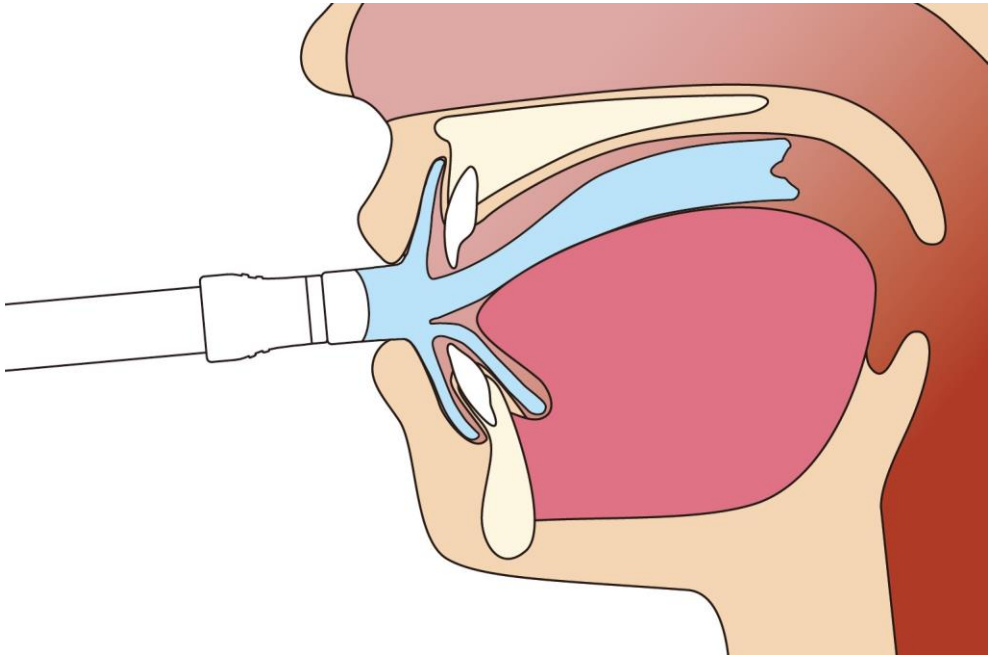






## Begynd behandlingen med iNAP.

Tryk på tænd/sluk knappen på konsollen i over 2 sekunder for at tænde enheden. De tre LED indikatorer vil blinke i et par sekunder under opvarmning, og derefter vil indikatoren for batteriets strømstatus blive vedvarende grøn, når systemet er fuldt tændt.

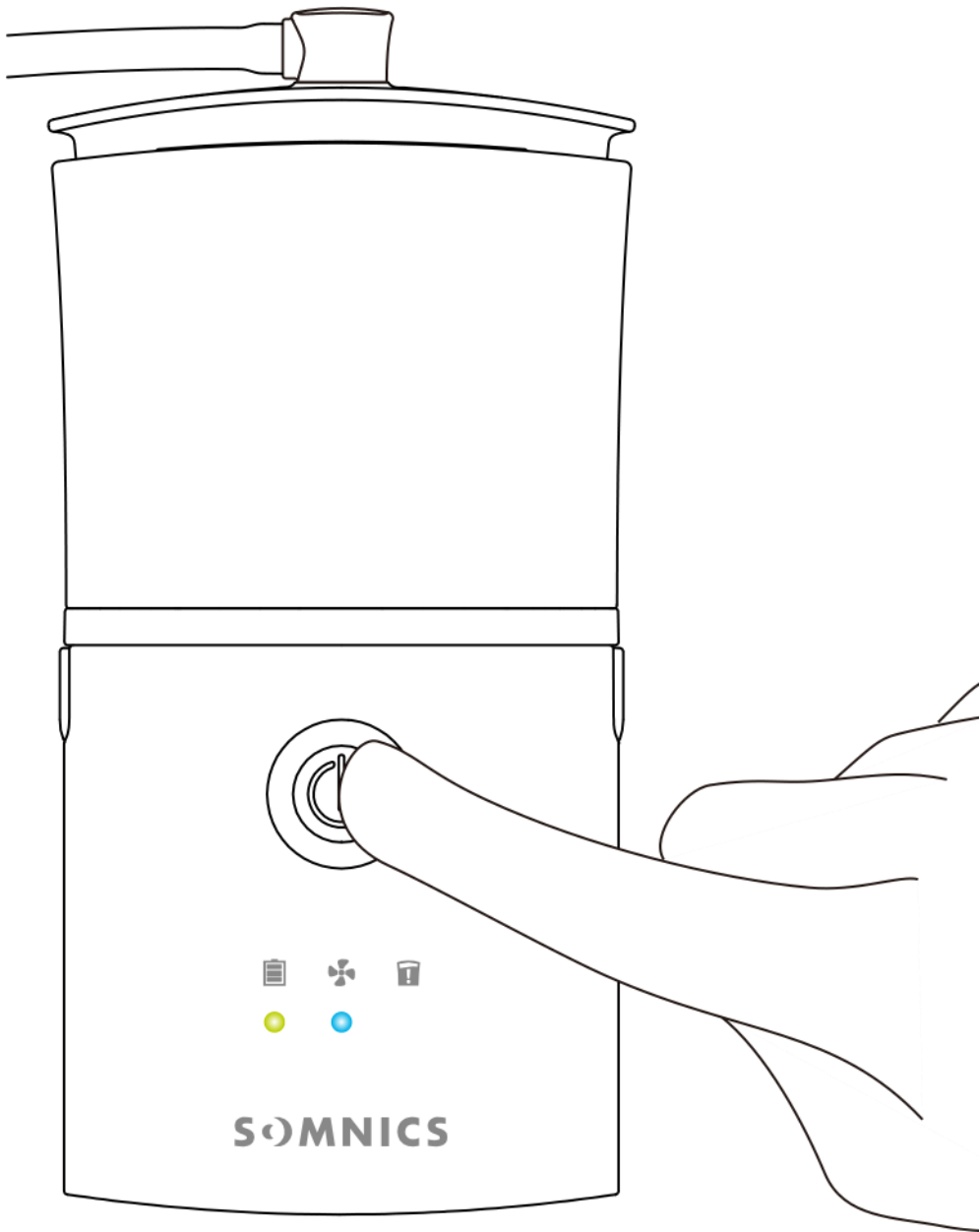


30 sekunder efter behandlingen er startet, vil lyset på batteri- og vakuuindikatorerne blive dæmpet. Et kort tryk på tænd/sluk knappen kan ændre lyset tilbage til den oprindelige styrke.

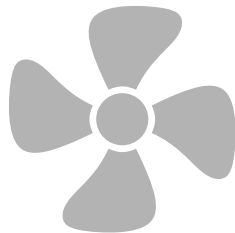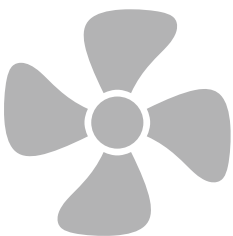

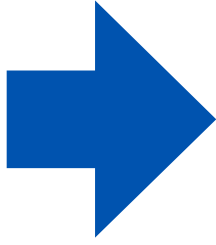

### Bortskaffelse af DryPads.


Tag mundstykket ud af munden og frakobl slangen fra beholderlåget. Tag den brugte DryPad ud af beholderen og smid den ud.

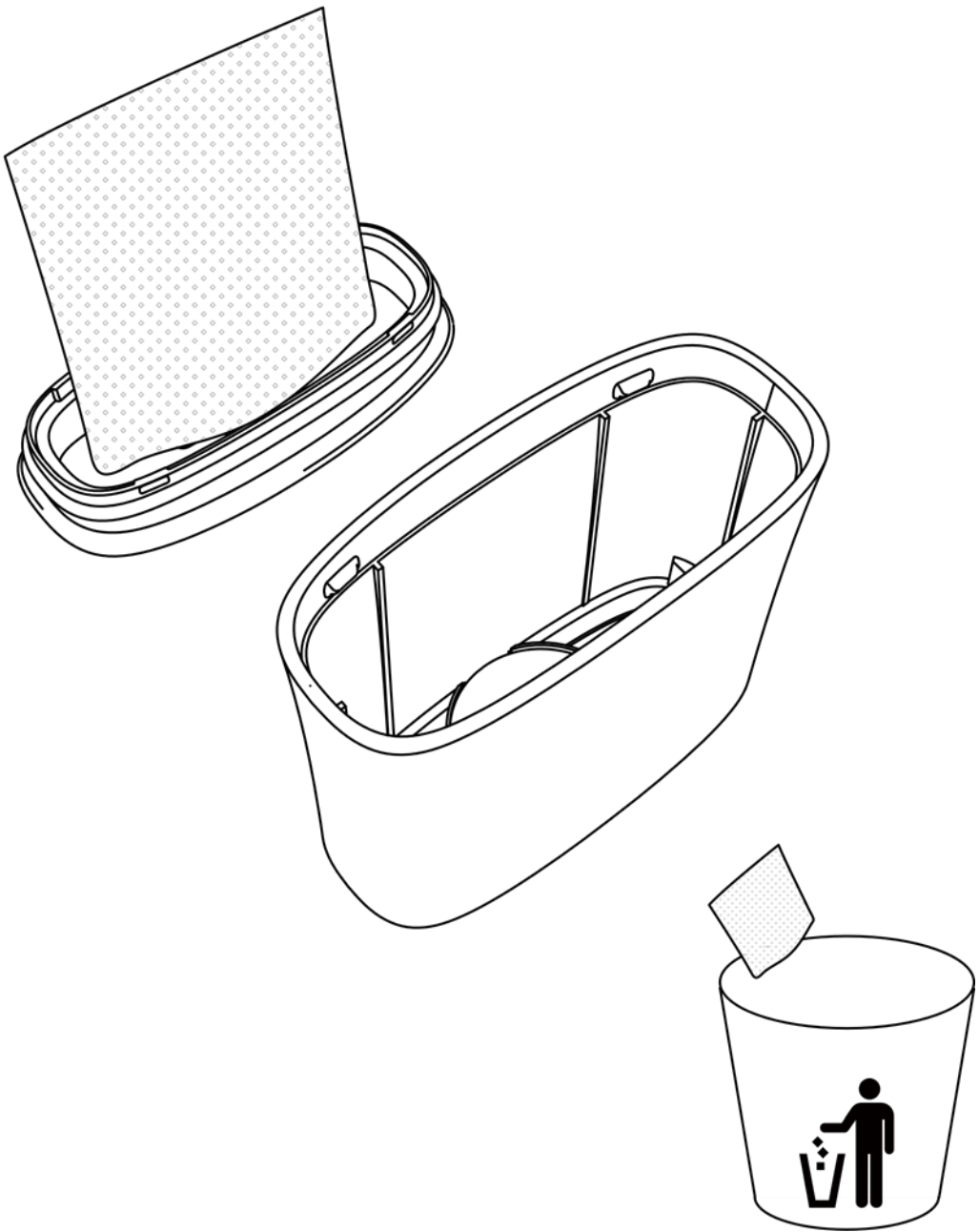

## Rengøring efter brug


Frakobl mundstykket fra slangen.

Rengør det brugte mundstykke i varmt vand.

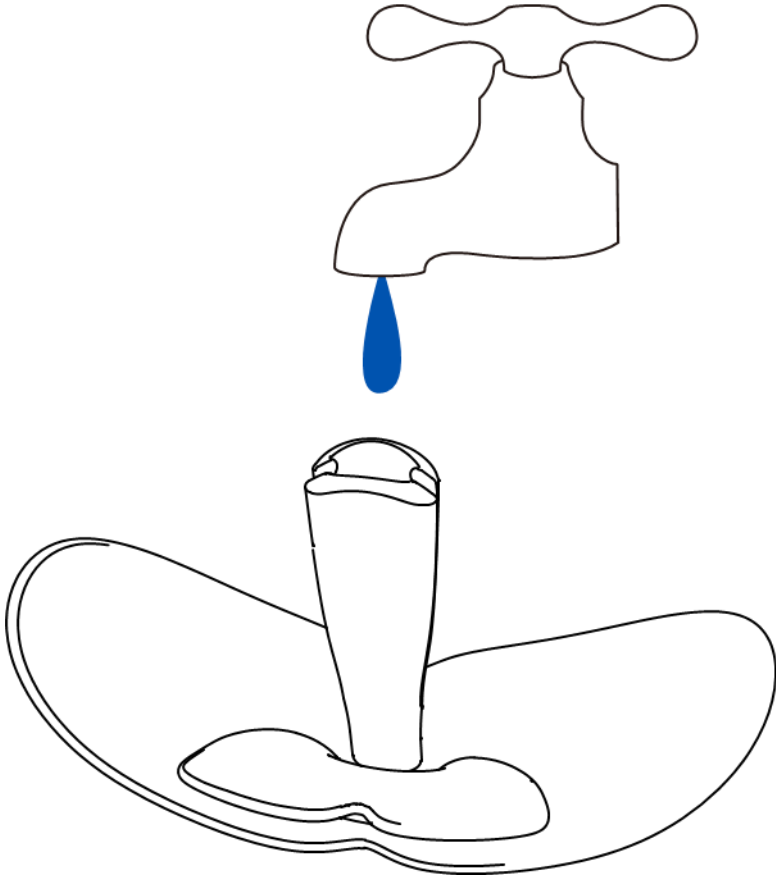


Rengør den brugte slange.

Lad varmt vand løbe igennem slangen.

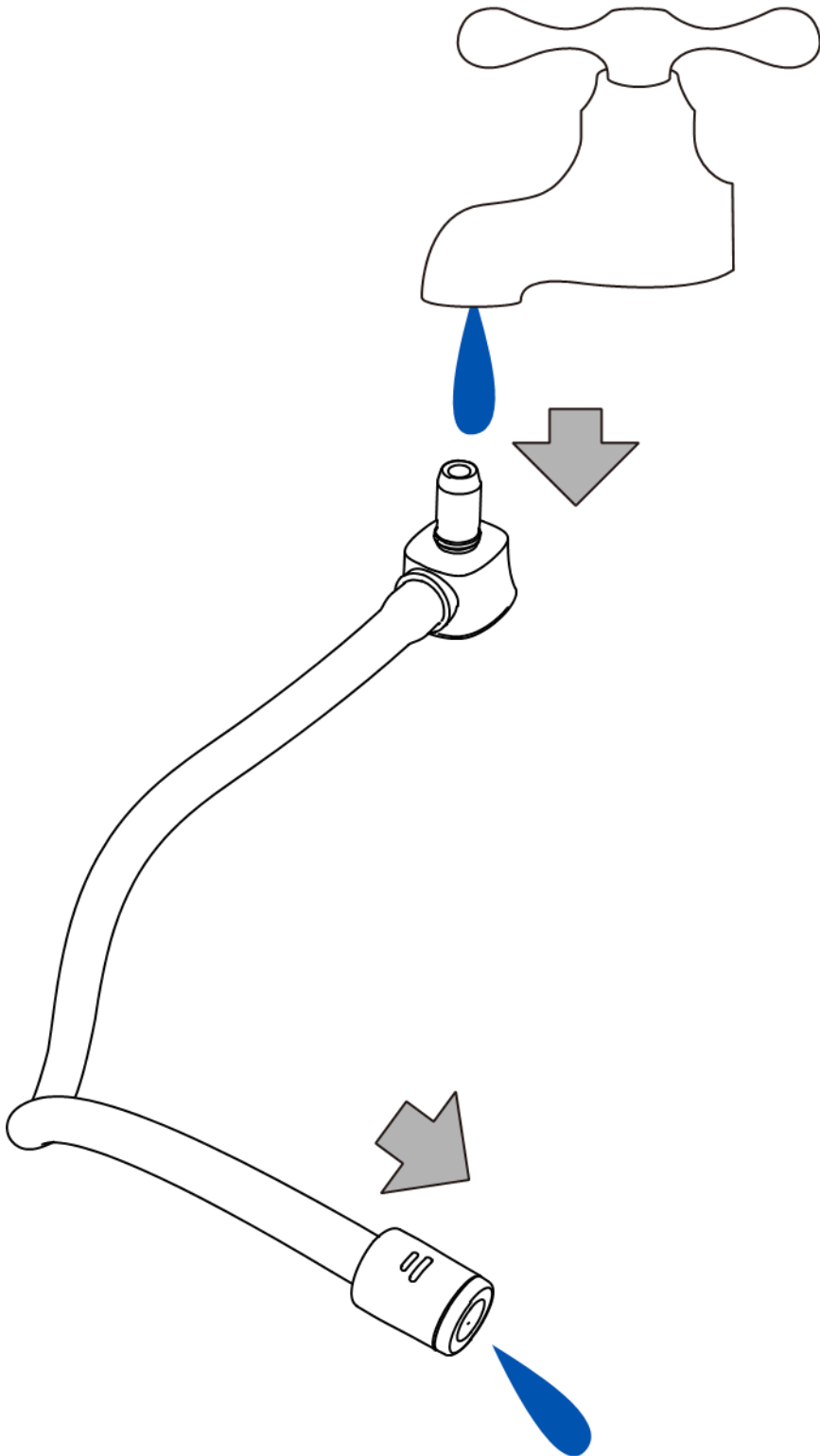

- Tag låget af mundvandsbeholderen og rengør låget i varmt vand.

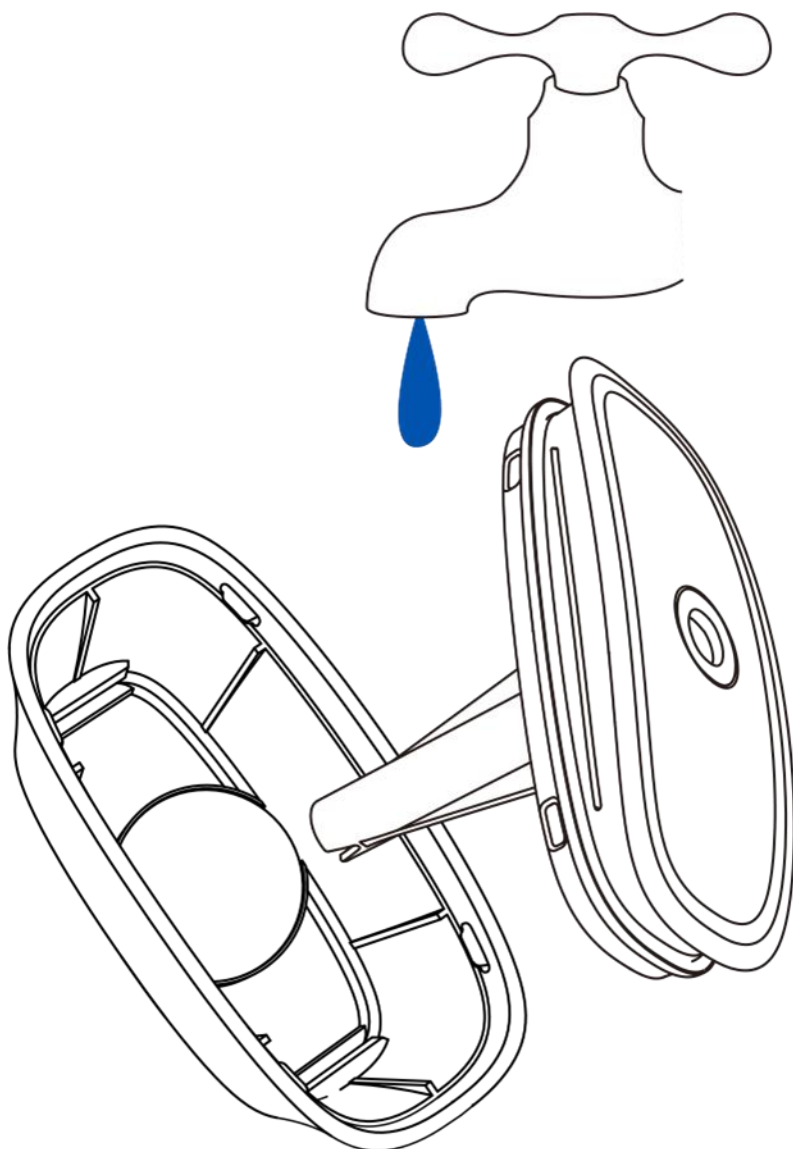

**Boks til opbevaring af mundstykke og slange.**

Læg mundstykke og slange i opbevaringsboksen.

(Solgt separat)

