

DET ENESTE HØJNIVEAU DESINFEKTIONSMIDDEL, DER ER BESVIST TIL AT VÆRE EFFEKTIV OVER FOR HPV PÅ 30 SEKUNDER, DESIGNET TIL AT DESINFICERE HELE ULTRALYDSAPPARATET

Der er over 200 forskellige typer af human papillomavirus (HPV). Type 16 og 18 er kendt for at være skyld i cirka 70 % af tilfældene af livmoderhalskræft. En ny videnskabelig undersøgelse af Meyers et al. (2020) viser, at Tristel Duo ULT, på en transvaginal ultralydssonde, har en effekt over for infektiøs HPV, type 16 og 18, på 30 sekunder.

Tristel Duo ULT leverer desinfektion på højt niveau til endokavitets-ultralydsprober, hudoverflade-ultralydsonder (inklusive dem, der bruges under invasive procedurer), probeholdere, ledninger, stik, tastaturer, skærme og endda mobilt medicinsk udstyr der kombinerer en ultralydsprobe med en smart-enhed.

TRISTEL DUO ULT ER LET AT BRUGE. BARE PÅFØR, TØR OG VENT!



TRYK TO DOSER TRISTEL DUO UD PÅ EN TØR SERVIET (DUO WIPE ANBEFALES).



BRUG SERVIETTEN TIL AT FORDELE SKUMMET PÅ OVERFLADEN AF ULTRALYDSPROBEN OG DERTILHØRENDE DELE. SØRG FOR AT ALLE OMRÅDER ER DÆKKET.



LAD OVERFLADEN TØRRE FOR AT SIKRE EN MINIMUM KONTAKTTID PÅ 30 SEKUNDER.

Tristel DuoTM
ULT

Tristel Duo ULT er CE-mærket som et klasse IIb medicinsk udstyr i overensstemmelse med det europæiske direktiv om medicinsk udstyr 93/42/EEC og tillæg 2007/47/EC.

Duo Wipes er et klasse I medicinsk udstyr i overensstemmelse med EU-forordningen om medicinsk udstyr (MDR 2017/745).



EFFEKTIVT

Tristel Duo ULT er sporicid, mykobaktericid, virucid, fungicid og bakteriedræbende med en kontakttid på 30 sekunder. Produktet er blevet grundigt testet i henhold til europæisk standard suspensionstest og en standardiseret metode, der involverer inokulering af overflader med testorganismen. Tristels klordioxid er effektiv mod bekymringsfulde mikroorganismer såsom:

- *Bacillus subtilis*
- *Mycobacterium terrae*
- **Humant papillomavirus (HPV)**
- Hepatitis B-virus (HBV)
- Humant immundefektvirus (HIV)
- Herpes Simplex Virus Type 1
- *Aspergillus brasiliensis*
- *Candida albicans*
- *Escherichia coli*
- *Neisseria gonorrhoeae*
- *Staphylococcus aureus*
- *Gardnerella vaginalis*
- *Streptococcus agalactiae*
- Carbapenem-resistente Enterobacteriaceae (CRE)
- *Klebsiella pneumoniae*
- Vancomycin-resistente Enterococci (VRE)
- *Enterococcus faecium*
- Methicillin-resistent *Staphylococcus aureus* (MRSA)



SIMPELT

Uddannelse og certificering er en væsentlig del af Tristels kundeservice. Vores online træningsportal giver brugertræning i Tristel Duo ULT på det tidspunkt og sted, der passer dig.



ØKONOMISK

Tristel Duo ULT kræver ikke investering i dyrt udstyr eller servicekontrakter. To portioner skum og en Duo Wipe er alt, hvad der skal til for at opnå desinfektion på højeste niveau.



MOBILT

Tristel Duo ULT kan bruges, hvor det er nødvendigt, uden at skulle bekymre sig om de begrænsninger, som automatiserede systemer kan medføre. Tristel Duo ULT er også velegnet til brug på steder, hvor elektricitet og vand ikke er let tilgængeligt.




KOMPATIBEL

Tristel Duo ULT er blevet testet og bekræftet til at være kompatibel med udstyr fra de store producenter, herunder:

- Alpinion Medical
- BD (Bard Access)
- BK Medical
- Butterfly Network
- Canon Medical Systems
- Carestream
- Fujifilm (Hitachi)
- FUJIFILM SonoSite
- GE Healthcare
- Healcerion
- MCube
- Mindray
- MobileODT
- Philips
- Quantel Medical
- Samsung Healthcare
- Siemens Healthineers
- Sonoscape
- Supersonic Imagine
- Verathon

ANVENDELSE

Tristel Duo ULT er det eneste højniveau desinfektionsmiddel, der behandler alle dele af en ultralydsprobe ens. Det er det eneste desinfektionsmiddel, der kan bruges sammen med mobilt medicinsk udstyr som en letanvendelig desinfektionsmetode på et højt niveau.

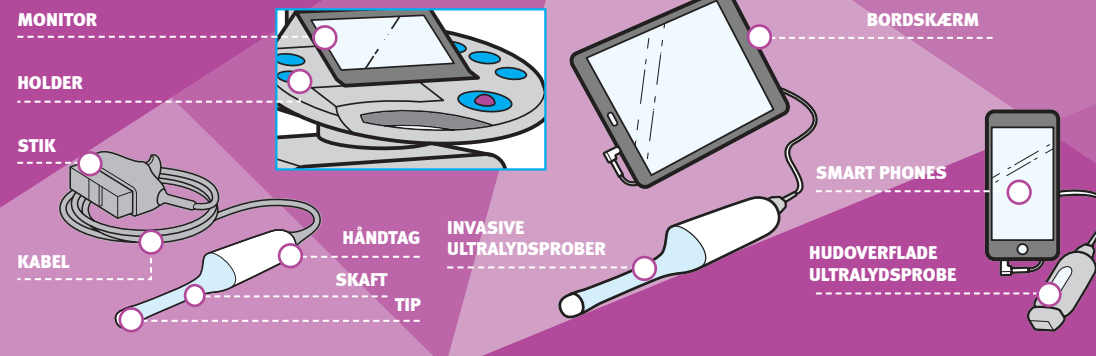

TRISTEL DUO ULT

ØDELÆGGER HPV PÅ UDSTYR I KLINISK ANVENDELSE*

FIND UD AF MERE: BIT.LY/HPVARTICLE

*Meyers, C., Milici, J., Robison, R. (2020) "The Ability of Two Chlorine Dioxide Chemistries to Inactivate Human Papillomavirus-contaminated Endocavitary Ultrasound Probes and Nasendoscopes" DOI: 10.1002/jmv.25666.

Duo Wipes er designet specielt til påføring af Tristel Duo ULT.

Duo Wipes er lavet af 100 % non-woven, lavt fnugafgivende polypropylen (18gsm) "og er" forskåret for at forhindre fnugafgivelse, når de tages ud af pakken.

Brugen af Duo Wipes gør det muligt effektivt at afgive desinfektionsmidlet på overfladen.



TRISTEL DUO ULT

- 125 ml Tristel Base Solution (citronsyre) + 125 ml Tristel Activator Solution (natriumchlorid)

Når den blandes, ved tryk på pumpen, genereres Tristels patenterede klordioxidkemi.

- 310 portioner pr. flaske/2 flasker pr. kasse

DUO WIPES

- 160 servietter pr. pakke / 320 servietter pr. pakke
- 2 pakker pr. karton / 6 pakker pr. karton

DUO DOK

- Designet til at have Tristel Duo ULT lige ved hånden
- 5 pr. pakke.