

Ugentlig rensning med Polident.



Der skal bruges glas, vand og Polident rensetablet.



Fyld varmt vand i et glas. Må max. være 40 grader varmt.



Kasser den brugte DryPad.



Opløs Polident rensetabletten i det varme vand.



Læg mundstykket ned i Polident opløsningen.



Tænd for iNAP.



Tryk på knappen i mindst 3 sekunder.



Lad iNAP opsuge Polident opløsningen fra glasset, så renevæsken løber gennem mundstykke og slange.



Når mundvandsbeholderen er fuld, slukkes iNAP. Polident opløsningen skal forblive i mundvandsbeholderen i 15 minutter.



Åben låget på mundvandsbeholderen.



Tøm glas, mundvandsbeholder og slange for Polident opløsningen.



Fyld rent vand i et glas. Læg mundstykket i vandet og tænd igen for iNAP.
Lad rigeligt med rent vand løbe igennem systemet.



Tøm mundvandsbeholder og slange for vand. Lad det tørre inden iNAP tages i brug.

VINGMED