

BRUGSANVISNING – FORBEREDELSE OG DRÆNAGE



1

Åbn pakningen, og fold den blå indpakning ud på et rent bord. Læg posen yderst på den blå indpakning, og sørg for, at posens adgangsspids forbliver inden for den blå indpakning.



2

Tag de sterile handsker på. Rør kun ved handskerne's manchet.



3

a. Tag ventilhætten ud af pakningen.
b. Åbn de 3 pakninger med spritservietter.
c. Tag den gennemsigtige forbindelse ud af pakningen. Placer alle dele midt på den blå indpakning.



4

Fjern beskyttelsen fra adgangsspidsen, og læg adgangsspidsen på den blå indpakning.



5

Tag ventilhætten af katetret.



6

Rengør omkring ventilåbningen med den første spritserviet.



7

Sæt forsigtigt adgangsspidsen i ventilen, og drej for at låse.



8

Brug rulleklemmen til at justere drænhastigheden.



9

Vent, indtil drænen er afsluttet. Drej derefter adgangsspidsen til ulåst tilstand, og fjern den forsigtigt fra katetret.

BRUGSANVISNING – FORBEREDELSE OG DRÆNAGE



10

Rengør omkring ventilåbningen med den anden spritserviet.



11

Påsæt en ny ventilhætte.



12

Rengør huden omkring katetret med den tredje spritserviet.




13

Placer skumpatchen omkring katetret, og rul katetret pænt sammen ovenpå patchen.



14

Dæk katetret med gazepatchen, og placer den selvklæbende forbindelse ovenpå.

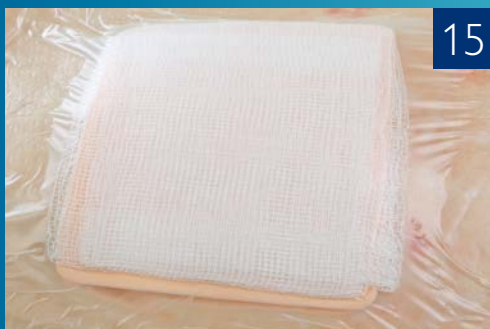

15

Forbindingen er nu anlagt korrekt.