

JET LUX




SPORICID DESINFEKTION MED LET BERØRING

JET LUX er et sporicid klordioxidskum. Hvert tryk på udløseren retter sig mod overflader, hvor mikrober er en risiko. JET LUX er exceptionelt brugervenligt og er Tristels hidtil letteste jetformel.



**BRUGER-
VENLIG**
IKKE KLASSIFI-
CERET SOM FARLIG

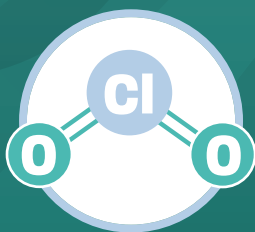

**SPORICID
DESINFEKTION**
DREVET AF
TRISTEL ClO_2



**SVAG
LUGT**
LLET
BERØRING



**HURTIG-
VIRKENDE**
EFFEKTIV PÅ
1 MINUT

TRISTEL KLORDIOXID (ClO₂)

JET LUX er bygget på den samme klordioxid (ClO₂) kemi som Tristel Medical Device Dekontamineringsprodukter. **JET LUX** indeholder to separate rum, der indeholder Base Solution (citronsyre) og Activator Solution (natriumchlorit).

Når det blandes ved at trykke på **JET LUX**-triggeren, genereres ClO₂-kemi. **JET LUX** indeholder et amfoterisk overfladeaktivt stof for at opnå ekstra rengøringsevne. ClO₂ eliminerer mikroorganismer ved at ødelægge deres molekylære strukturer. Det betyder, at skadelige mikrober ikke kan opbygge resistens over for ClO₂.



MILJØVENLIGE SPORICID-SERVIETTER

Effektivitet med den standardserviet, der anvendes i EN 16615, betyder, at **JET LUX** kan parres med en hvilken som helst tørserviet. Brug en mikrofiberklud eller en bionedbrydelig tørserviet til at skabe sporicidale servietter. Du kan stoppe med at bruge plastikservietter, som er fugtede på forhånd.

BEVIST EFFEKTIV 1 MINUT MOD:


SPORICID	EN 17126
MYCOBACTERICIDAL	EN 14348
VIRUCID	EN 14476
YEASTICIDAL/FUNGICID	EN 13624
	EN 16615
BAKTERIEDRÆBENDE	EN 13727
	EN 16615

<i>Bacillus cereus</i>	Bovin coronavirus
<i>Bacillus subtilis</i>	<i>Aspergillus brasiliensis</i>
<i>Clostridioides difficile</i>	Udvidet spektrum Beta-Lactamase <i>Klebsiella pneumoniae</i>
Adenovirus type 5	Methicillin-resistent <i>Staphylococcus aureus</i> (MRSA)
Murint norovirus	Multiresistent <i>Acinetobacter baumannii</i>
Poliovirus type 1	<i>Candida albicans</i>
<i>Enterococcus hirae</i>	<i>Candida auris</i>
<i>Staphylococcus aureus</i>	Vancomycin-resistente enterokokker (VRE) <i>Enterococcus faecium</i>
Carbapenem-resistent Enterobacteriaceae (CRE) <i>Klebsiella pneumoniae</i>	

NEM AT ANVENDE ANVENDE, TØR AF OG VENT

Hver flaske **JET LUX** leverer 570 doser sporicid klordioxidskum.

Du skal blot anvende, tørre af og vente!

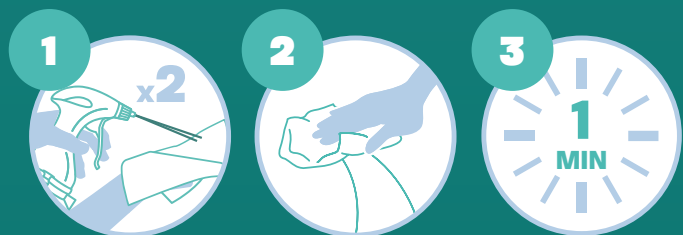

MØD ANDRE MEDLEMMER AF JET-FAMILIEN

Til berøringsfølsomme og højrisikable overflader skal du bruge JET PRO. Desinfektionsmidlet der giver varig beskyttelse. En ekstra ingrediens gør det muligt for skummet at dræbe bakterier og indkapslede vira i op til 8 timer efter påføring. Kontakt din lokale salgsrepræsentant for at få mere at vide.